

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/multiclean-5x5g-sprzedaz-wylacznie-dla-podmiotow-gosp-i-instytucji-panstw-weryfikacja-nip-w-rejestrze-p-216.html>



MULTICLEAN (5x5g) ---- Sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gosp. i instytucji państw. Weryfikacja NIP w rejestrze.

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM207
Producent	ROKO Sp. z o.o.

Opis produktu

MULTICLEAN - proszek do czyszczenia protez wykonanych z tworzyw termoplastycznych oraz akrylu.

Skutecznie czyści protezy, szyny, aparaty ortodontyczne z nalotów, osadów i przebarwień.

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Połowę zawartości rozpuścić w ok. 250 ml czystej, przegotowanej i ostudzonej wody.

Roztwór wlać do myjki wibracyjnej. Zanurzyć protezę i włączyć urządzenie na ok. 10-15 minut. W przypadku silnie zabrudzonych protez, czynność powtarzać do skutku.

Jedna saszetka wystarcza na dwa mycia.

Uwaga !!!!!

Produkt w sprzedaży wyłącznie dla instytucji państwowych oraz podmiotów gospodarczych.

Sklepy specjalistyczne prowadzące sprzedaż wysyłkową tego preparatu **dla osób prywatnych** to m. in.:

ALFA MED - Lublin - tel. 81 740 20 30

APTEKA EKO - Kraśnik - tel. 81 825 05 27

CENTRAL-DENT - Tarnów - tel. 504 480 854; agnieszka.kmiec@o2.pl

CEZAL - Białystok - tel. 518 805 648; sklep@cezal.pl

CSK-MED - Nysa - tel. 661 379 391; biuro@csk-med.pl

DENTASHOP - Garwolin - tel. 784 635 971

EKOMED PARTNERS - Zgierz - tel. 661 101 205

FACEDENTAL - Siedlce - tel. 508 187 257; sklep@facedental.pl

GALICJA BWS - Kraków - tel. 12 661 35 50; biuro@servident.pl

HAPPYDENTAL - Wrocław - tel. 71 349 77 90; info@happydental.pl

MIXDENT - Łódź - tel. 42 299 18 45; bok@mixdent.pl

PROMED - Zielona Góra - tel. 68 323 06 95

TYTAN - Częstochowa - tel. 34 322 09 39; tytan@tytan.info

Dodatkowe punkty sprzedaży detalicznych dla osób prywatnych dostępne pod nr tel.: 34 369 78 21