

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/room-lampa-bakteriobojcza-uv-c-jednofunkcyjna-p-1099.html>



## ROOM - lampa bakteriobójcza UV-C jednofunkcyjna

Cena	<b>1 552,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny 4-6 tygodni</b>
Numer katalogowy	<b>DEU004</b>
Producent	<b>RHODE</b>

### Opis produktu

**RHODE UV-C ROOM** jest urządzeniem przeznaczonym do suchej sterylizacji powietrza działającym w oparciu o promieniowanie UV-C, które eliminuje wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i pleśń. W sterylizatorach przepływowych jednofunkcyjnych RHODE UV-C, dezynfekcja powietrza odbywa się w zamkniętej komorze, która uniemożliwia przenikanie światła na zewnątrz osłony.

Powietrze wciągnięte do wnętrza komory sterylizatora przechodzi przez filtr ANTY-DUST umieszczony blisko wlotu. Tutaj większe cząstki są blokowane zapobiegając zanieczyszczeniu odbłyśników lampy bakteriobójczej. Następnie powietrze jest przepuszczane bezpośrednio przez niskociśnieniową lampę rtęciową, która dzięki promieniom UV-C o precyzyjnie emitowanej długości fali 253,7 nm unicestwia wszystkie mikroorganizmy. Wysoki współczynnik odbicia zwierciadeł komory koncentruje promienie UV-C podnosząc efektywność oddziaływania promieniowania. Powracające zdezynfekowane i oczyszczone powietrze jest wypuszczane przez dyszę końcową, co kończy proces efektywnego oczyszczania.

Urządzenie gwarantuje ciągłą dezynfekcję powietrza o wydajności nawet do 150 m<sup>3</sup>/h.

**Największą zaletą systemu jest całkowite zniwelowanie zagrożenia dla osób przebywających w pomieszczeniu podczas pracy urządzenia , gdyż emisja zewnętrzna UV-C jest zredukowana do zera.**

### ZASTOSOWANIE

- ▶ mieszkania, biura i urzędy
- ▶ gabinety stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne
- ▶ szpitale, przychodnie i laboratoria
- ▶ salony kosmetyczne, fryzjerskie i barberskie,
- ▶ gabinety masażu tatuażu i piercingu
- ▶ solaria i kluby fitness
- ▶ restauracje, sklepy i kawiarnie
- ▶ szkoły, żłobki i przedszkola
- ▶ miejsca użyteczności publicznej



### Nowoczesny design i najwyższa jakość

Nowoczesny design sprawia, że sterylizator ROOM wkomponuje się w każde pomieszczenie i będzie ozdobą każdego mieszkania, gabinetu czy biura.

Do wykonania sterylizatorów RHODE ROOM używa się wyłącznie najwyższej jakości komponentów ze stali nierdzewnej i aluminium, w konstrukcji nie ma elementów z plastiku.

W wersji ELITE CHROME obudowa pokryta trzywarstwowym lakierem, a elementy konstrukcji wykonane są z ręcznie polerowanego aluminium.

Steryliizatory RHODE to najwyższy możliwy standard dla urządzeń tego typu.

### NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU MEDYCZNEGO POŚWIADCZONA CERTYFIKATEM DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

**ISO 13485:2003**

### NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU POŚWIADCZONA CERTYFIKATEM ORGANIZACJI PRODUKCJI

**ISO 9001:2015**

#### **Parametry techniczne:**

- zasilanie: **230V/50Hz**
- poziom hałasu: **40dB**
- stopień ochrony obudowy: **IP 20**
- wymiary (HxBxG): **650x200x120mm**
- wydajność wentylatora: **145m<sup>3</sup>/h**
- gwarancja: **36 miesięcy**

#### **MODEL 30:**

- moc: **45W**

- 
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
  - moc promienników: **2x15W**
  - rodzaj: **PHILIPS TUV T8 15W G15**
  - żywotność: **9.000 h/min. 1 rok**
  - promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
  - powierzchnia pomieszczenia:

**MODEL 70:**

- moc: **87W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc: **2x36W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 36W G36**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

**UWAGA:**

- kolor obudowy - **biały**
- istnieje możliwość polakierowania obudowy w innym kolorze RAL - **dopłata 30%**
- wykończenie w wersji CHROME - **dopłata 369 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MODEL:** 30 , 70